
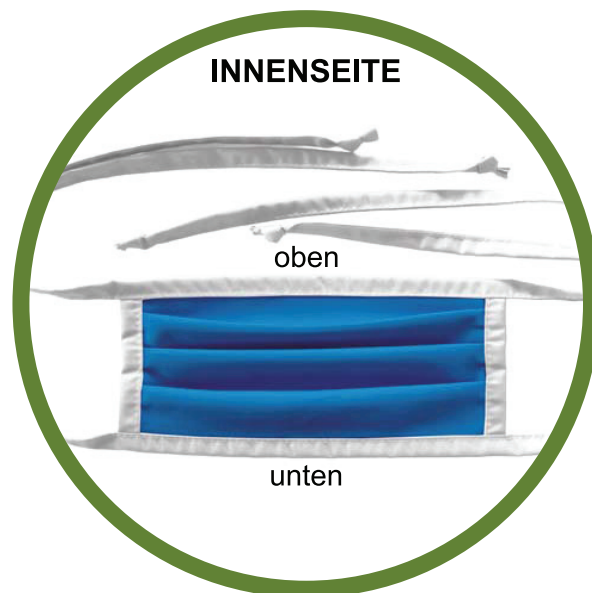


MUND-NASEN-SCHNELLMASKE

WASCH- UND WIEDERVERWENDBAR

ZENTRALE

GW St. Pölten T +43 (0)2742/867-0
Integrative Betriebe GmbH F +43 (0)2742/867-4009
Ghegastraße 9-11 www.gw-stpoelten.com
3151 St. Pölten-Hart / Austria www.schilder-shop.at
gw@gw-stpoelten.com

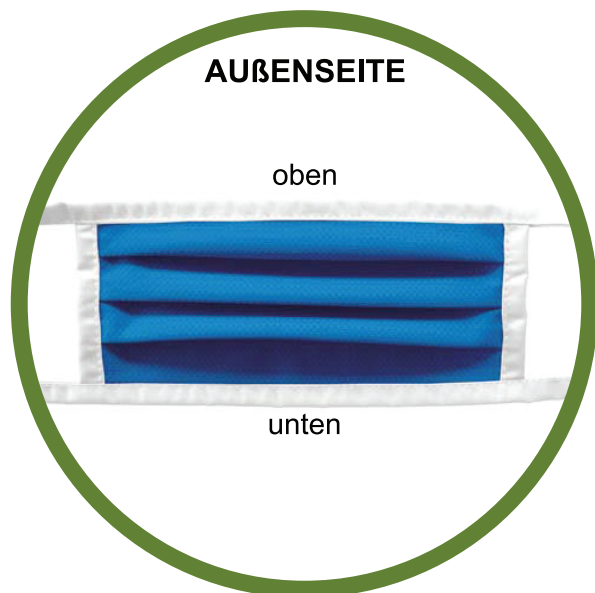

Hinweis: Bilder der Masken sind „Symbolbilder“ – die Farben des Stoffes und der Bänder können abweichen.

BESCHREIBUNG:

Textile Stoffmaske, welche aus Rohmaterial, das der Norm EN 13795:2013 entspricht, gefertigt wurde.

MATERIAL:

OP-Material R MOR Tex, Level 4
Medical ePTFE Laminat.

VERWENDUNGSZWECK:

Vorwiegend als Fremdschutz zur Reduktion von Tröpfcheninfektionen im Niedrig-Risiko-Bereich einsetzbar.

WIRKSAMKEIT:

Filterleistung des verwendeten Stoffes wird für Bakterien mit 100 % angegeben, kein Atemschutz!

EINSATZBEREICH:

Mobile Pflegedienste, Pflegeheime, Krankenanstalten usw.
Solange kein Kontakt zu nachgewiesenen Covid-19 Fällen bzw. zu Covid-19 Verdachtsfällen besteht.

REINIGUNG:

Vor der ersten Verwendung bei 60-90° waschen, kann bis zu 80 mal gewaschen und wieder verwendet werden.

WERK 2

Hans-Czettel-Straße 4
3950 Gmünd / Austria

T +43 (0)2742/867-6160
F +43 (0)2742/867-6169

Unternehmenssitz: St. Pölten
Firmenbuch: LG St. Pölten • FN: 88468a
UID-Nummer: ATU 19879807
ARA-Nr.: 7923

Bankverbindung: Sparkasse Niederösterreich Mitte West AG
IBAN: AT112025600000051524 • SWIFT: SPSP AT 21
DVR-Nr.: 0554154
ERA-Nr.: 52014 • EDM-Portal / GLN-Nr.: 9008390204429

RICHTIGER UMGANG MIT SCHUTZMASKEN

	Mund und Nase mit der Maske bedecken
	Die Bänder am Hinterkopf zusammenbinden
	Während des Tragens die Maske nicht mit den Händen berühren
	Maske an den Bändern an der Seite - von hinten nach vorne - vom Gesicht nehmen, dabei Maske nicht berühren
	Maske vor der Erstverwendung und nach der Verwendung bzw. Wiederverwendung zur Wäsche geben und bei 60° bis 90° waschen
	Hände mindestens 30 Sekunden mit warmen Wasser und Seife waschen, sowohl vor dem Anlegen als auch nach dem Abnehmen der Maske

WICHTIGE PRODUKTINFORMATION:

Die Mund-Nasen-Schnellmasken entsprechen nicht dem genormten Mund-Nasen-Schutz nach dem Medizinproduktgesetz und stellen keine persönliche Schutzausrüstung dar, sind nicht getestet oder zertifiziert! Keine FFP-Maske. Der Artikel ist aus hygienischen Gründen vom Umtausch ausgeschlossen.